

Пробный Implant-Guide®

Implant-Assistant®

Значительное сокращение времени вмешательства

Точная установка имплантатов в запланированном положении

Безопасная хирургия

Более спокойное послеоперационное течение

Высокий эстетический и функциональный результат



Для ознакомления с технологией высокоточного проведения операций дентальной имплантации команда **Implant-Assistant** предлагает изготовление пробных индивидуальных имплантологических шаблонов **Implant-Guide®**, с опорой на слизистую, костную ткань и зубы.

Вы можете, не приобретая программу **Implant-Assistant®**, однократно заказать пробный шаблон.

Перед проведением КТ-исследования настоятельно рекомендуем ознакомиться с памятками:

- **Implant-Guide®** (Варианты имплантологических шаблонов)
- **X-ray-шаблон** (Изготовление рентгеноконтрастных шаблонов)
- **CT-scan** (Протоколы сканирования на компьютерных томографах)

ШАГ 1 — ЗАГРУЗКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты КТ-исследования необходимо сохранить в формате DICOM, заархивировать и связаться с командой Implant-Assistant для загрузки на сервер www.implant-assistant.com. Можно самостоятельно загрузить архив на любой бесплатный файловый сервер, например:

<http://www.dump.ru>

<http://www.webfile.ru>

<http://www.allfiles.ru>

Пришлите заказ по электронной почте на адрес mail@implant-guide.ru

Заказ должен содержать следующую информацию:

- места установки имплантатов;
- марка имплантатов, которые планируете установить;
- вариант Implant-Guide который хотите заказать;
- ссылка на архив с результатами КТ-исследования.

ШАГ 2 — ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Данные КТ-исследования обработают, наш доктор расставит имплантаты и мы вышлем вам по электронной почте ссылку на проект Implant-Assistant с расставленными имплантатами. Для просмотра данного проекта необходимо загрузить и установить бесплатную программу **Implant-Assistant Viewer**.

Вы откроете и просмотрите проект. Если будете согласны с планом операции, то оплатите только стоимость шаблона, необходимых компонентов и доставку.

Обработку КТ-исследования для в программы Implant-Assistant Planner сотрудники Центра Дентальной Имплантации сделают бесплатно!

ШАГ 3 — ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ

Готовый шаблон с необходимыми компонентами будут отправлены вам курьером или экспресс-почтой.

Рекомендации при работе с шаблоном смотрите в памятках «**Implant-Guide**», «**Компоненты Implant-Guide**».

Проведите операцию с применением **Implant-Guide®** и оцените ее результаты.



Implant-Assistant®

*Команда **Implant-Assistant**
желает вам удачных
операций!*